



LEICHTER ATMEN

mit CEGLA Medizintechnik

Produktkatalog

CEGLA
MEDIZINTECHNIK

INHALTSVERZEICHNIS

Atemtherapie	6
RC-Cornet® & RC-Cornet® PLUS Varianten	7
RC-Cornet®	8
RC-Cornet® N	9
RC-Cornet® PLUS	10
RC-Cornet® PLUS NASAL	12
RC-Cornet® PLUS TRACHEO	14
Atemtraining	16
RC-FIT® CLASSIC	17
Pflege & Hygiene	21
RC-Gel® NASAL	22
RC-Pflege® N Nasen- und Rachenspray	23
RC-Clean® Reinigungsbeutel für die Mikrowelle	24
Informationen, Wissen & Service	25
Das Gesundheitsportal – www.leichter-atmen.de	26
CEGLA Social Media	27
Gesamtübersicht aller Produkte	29

Wir helfen leichter zu atmen.

Seit 1982 stehen wir als inhabergeführtes Familienunternehmen für Qualität und Innovation in der Atemtherapie. Immer nach den neuesten medizinischen Standards und bereits seit Sommer 2024 MDR*-zertifiziert.

Wir verbessern kontinuierlich unsere bewährten Produkte und entwickeln gleichzeitig neue, innovative Hilfsmittel. Dies ist nur durch den engen Austausch mit Partnerinnen und Partnern aus den verschiedensten Bereichen der Wissenschaft, Kliniken, Praxen sowie Therapie- und Pflegeeinrichtungen möglich. Für diese großartige Unterstützung ❤️ möchten wir uns herzlich bedanken.

All dies findet fast ausschließlich bei uns in Montabaur statt, so dass Ihnen qualitativ hochwertige und langlebige Produkte mit einem Höchstmaß an Liefersicherheit und sozialer Verantwortung zur Verfügung stehen. Um das Portfolio für Sie abzurunden, arbeiten wir dort, wo es aus eigener Kraft nicht möglich ist, eng und vertrauensvoll vorzugsweise mit europäischen Partnern zusammen.

Ihre Fragen, Anregungen und der Austausch mit uns sind uns wichtig und wir freuen uns auf Ihr Feedback.

Ihr Team der CEGLA Medizintechnik


Ein Blick hinter die Kulissen: Produktion/Logistik bei uns in Montabaur.





ATEMTHERAPIE

Die Ziele der ganzheitlichen Atemtherapie für die oberen und unteren Atemwege:

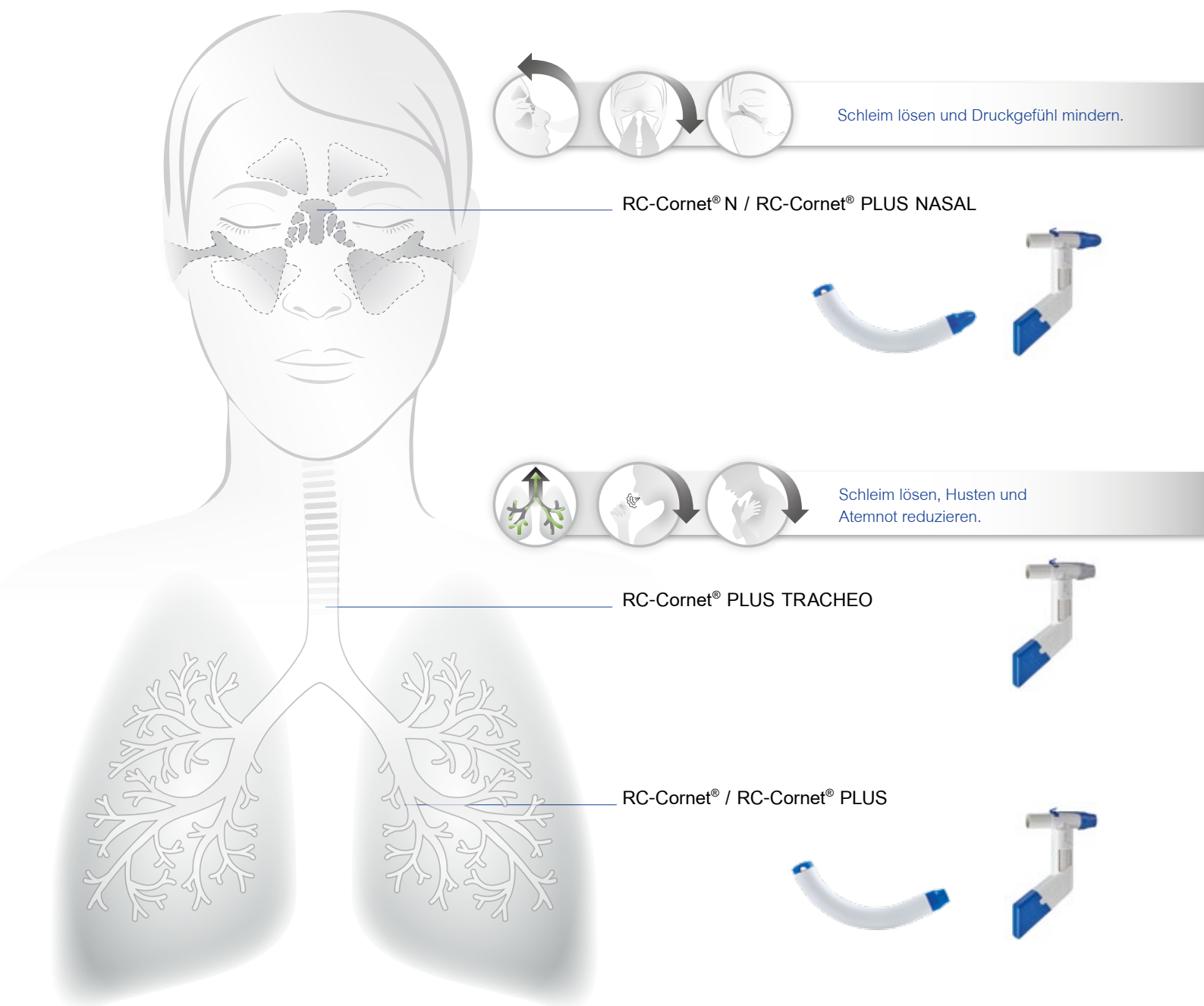

Die Nase reinigt, befeuchtet und erwärmt die eingeatmete Luft. So wird diese optimal auf die unteren Atemwege für den O_2/CO_2 -Tausch vorbereitet.

Ist die Selbstreinigungsfunktion der Atemwege durch Erkrankungen oder verstärkte Sekretbildung beeinträchtigt, sollte sofort – neben der aus Kindheitstagen bekannten Inhalation – auch eine Atemtherapie angewendet werden.

So kann bei regelmäßiger Anwendung einer Verschlechterung vorgebeugt werden. Das Sekret wird nicht nur verflüssigt, sondern durch die Atemtherapie auch abtransportiert.

Alternativ zur Feuchtinhalation besteht die Möglichkeit, durch befeuchtende Nasensprays oder einer Nasenspülung die Reinigungsfunktion der Nase zu unterstützen.

RC-Cornet®

Atemtherapiegerät für die unteren Atemwege

Für das Lösen von Bronchialschleim sowie die Reduktion von Husten und Atemnot. Studien belegen, dass die regelmäßige RC-Cornet® Therapie den Antibiotikabedarf und die Häufigkeit von Krankenhausaufenthalten reduziert.¹⁾

Mögliche Wirkungsweisen:

- lösen von festsitzendem Bronchialschleim

Produktmerkmale:

- entspricht höchsten klinischen Anforderungen (KRINKO) bezüglich Anwendung und Hygiene (max. 134 °C/Mehr-Patienten-Gebrauch)
- geeignet für Kinder und Erwachsene
- lageunabhängig 

Das RC-Cornet® Mund-Nasen-Set

(Artikel-Nr. 2140, PZN 17 170 893) ermöglicht den Umbau zu einem RC-Cornet® N für die Therapie der oberen Atemwege.



RC-Cornet®

PZN 08 418 667

Artikel-Nr. 210

Erstattungsfähig durch den Haus-, Kinder- oder Lungenfacharzt unter Hilfsmittel-Positions-Nr. 14.24.08.0004



RC-Cornet® N

Atemtherapiegerät für die oberen Atemwege

Das RC-Cornet® N verschafft bei regelmäßiger Anwendung effektiv und auf natürliche Weise eine freie Nase/ sekretfreie Nasennebenhöhlen.

Mögliche Wirkungsweisen¹⁾:

- wirkt langfristig abschwellend im gesamten Nasen-Rachen-Raum
- befreit von lästigem Schleim im Nasen-Rachen-Raum
- lindert Husten bei Postnasal-Drip-Syndrom
- senkt bronchiale Hyperreagibilität bei Asthma
- hilft bei Nasenspraysucht (Privivismus)
- verbessert die Belüftung der Nasennebenhöhlen und des Mittelohrs (Tubenventilationsstörungen)

Produktmerkmale¹⁾:

- entspricht höchsten klinischen Anforderungen (KRINKO) bezüglich Anwendung und Hygiene (max. 134 °C/Mehr-Patienten-Gebrauch)
- geeignet für Erwachsene und Kinder
- lageunabhängig 

Das RC-Cornet® Mund-Nasen-Set

(Artikel-Nr. 2140, PZN 17 170 893) ermöglicht den Umbau zu einem RC-Cornet® für die Therapie der unteren Atemwege.




RC-Cornet® N
PZN 08 862 327
Artikel-Nr. 220

INFO


¹⁾ Studiensammlung:
www.cegla.de/service/fachinformationen

Die einzigartigen Eigenschaften der RC-Cornet® PLUS Varianten

Zwei Einstellungen: Mit Einstellung I werden die Atemwege zunächst geweitet für eine anschließende, noch effektivere Schleimlösung mit Einstellung II.

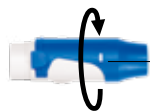


Einstellung I: Stabilisierender Ausatemdruck zur Weitung der Atemwege (StabilizingPEP™)

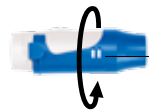


Einstellung II: Mobilisierender Ausatemdruck mit hoher Flussrate zum Sekretabtransport (MobilizingPEP™)*

Vier Widerstände: Die 4 verschiedenen Widerstände ermöglichen eine individuelle Atemtherapie auch schon für sehr schwache Patient:innen (inklusive neuromuskuläre und Schlaganfall-Patienten) durch die Nutzung der kompletten Ausatemluft.

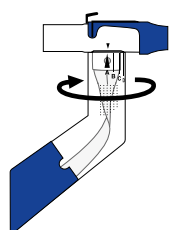


Anfangsdruck gilt je Einstellung I und II

Widerstand A: 4 cm/H₂O
Widerstand B: 7 cm/H₂O
Widerstand C: 10 cm/H₂O
Widerstand D: 16 cm/H₂O

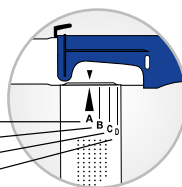

Die Kombi-Therapie – Verbindung von Atemtherapie und Feuchtinhalation ermöglicht:

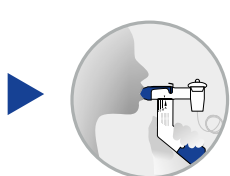


RC-Cornet® PLUS Kombi-Therapie (alle Varianten)



Verkürzung der täglichen Therapiezeit



Verbesserung der Medikamentendeposition

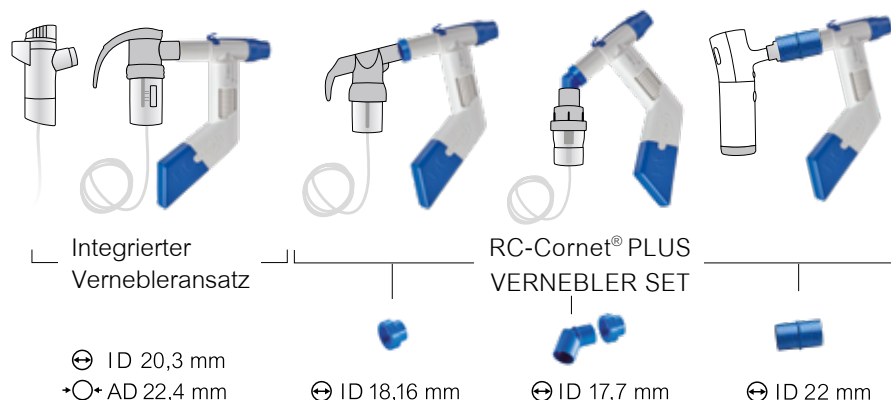

Weitung der Atemwege in Einstellung I und gleichzeitige Feuchtinhalation über den integrierten Vernebleransatz**. Der integrierte Vernebleransatz ist passend für alle ISO-genormten Vernebler.

Für nicht-ISO-genormte Vernebler: RC-Cornet® PLUS VERNEBLER SET | Artikel-Nr. 2651



RC-Cornet® PLUS

Atemtherapie mit Oszillationen und Feuchtinhalations-Anschluss für die unteren Atemwege

Für das Lösen von Bronchialschleim sowie die Reduktion von Husten und Atemnot. Studien¹ belegen, dass bei regelmäßiger Anwendung Exazerbationen, Antibiotikabedarf sowie Klinikaufenthalte bei chronischen Atemwegserkrankungen vermindert werden können.

Mögliche Wirkungsweisen:

- Weitung der Atemwege (Einstellung I) und Lösung von Bronchialschleim (Einstellung II)
- Reduktion von Husten und Atemnot
- Verbesserung des Gasaustausches

Produktmerkmale:

- in **jeder Einstellung** kann die Intensität des **Widerstandes patientengerecht** in vier Stufen (A–D) eingestellt werden, somit auch für **schwache** Patient:innen nutzbar
- entspricht höchsten klinischen Anforderungen (KRINKO) bezüglich Anwendung und Hygiene (max. 134 °C/Mehr-Patienten-Gebrauch)
- integrierter, ISO-genormter Vernebleransatz ermöglicht die gleichzeitige Atemtherapie und Feuchteinhalation mit Verneblern zur besseren Sekretolyse (Kombi-Therapie)
- lageunabhängig 
- die RC-Maske für Erwachsene und Kinder kann ergänzend auf das RC-Cornet® PLUS aufgesteckt werden und somit u. a. neurologischen Patient:innen die Therapie erleichtern



RC-Cornet® PLUS

PZN 12 419 336

Artikel-Nr. 2600

Erstattungsfähig durch den
Haus-, Kinder- oder Lungen-
facharzt unter Hilfsmittel-
Positions-Nr. 14.24.08.0013

[illegible]

RC-Cornet® PLUS NASAL

Atemtherapie mit Oszillationen und Feuchtinhalations-Anschluss für die oberen Atemwege

Studien belegen¹⁾

- dass die regelmäßige RC-Cornet® PLUS NASAL Therapie über 4 Wochen bei 70 von 100 Atemwegspatient:innen²⁾ zu einer Auflösung der Schleimstraße führte.
- dass der Atemwegswiderstand und die bronchiale Überempfindlichkeit sich gegenüber einer alleinigen Kochsalzinhalation durch die Physiotherapie mit dem RC-Cornet® PLUS NASAL signifikant senken ließen.

Mögliche Wirkungsweisen:

- befreit die oberen Atemwege von Schleim, z. B. bei chronischer Sinusitis³⁾
- lindert den Husten bei Postnasal-Drip-Syndrom
- senkt bronchiale Hyperreagibilität¹⁾, z. B. bei Asthma
- hilft bei Nasenspraysucht (Privinisismus)
- verbessert die Belüftung der Nasennebenhöhlen und des Mittelohrs
- verbessert auch Erkrankungen der unteren Atemwege wie z. B. COPD oder Asthma

Produktmerkmale:

- entspricht höchsten klinischen Anforderungen (KRINKO) bezüglich Anwendung und Hygiene (max. 134 °C / Mehr-Patienten-Gebrauch)
- integrierter, ISO-genormter Vernebleransatz ermöglicht die gleichzeitige Atemtherapie und Feuchtinhalation mit Verneblern zur besseren Sekretolyse (Kombi-Therapie)
- lageunabhängig 

Als Zubehör bieten wir das VERNEBLER SET für nicht genormte Vernebler an.




RC-Cornet® PLUS NASAL

PZN 12 441 330

Artikel-Nr. 2680

Erstattungsfähig durch den Haus-, Kinder- oder Lungenfacharzt unter Hilfsmittel-Positions-Nr. 14.24.08.0013

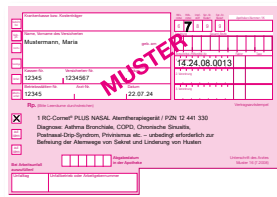

¹⁾ Studiensammlung:

www.cegla.de/service/fachinformationen

²⁾ Atemwegspatient:innen (COPD & Asthma, die zusätzlich unter einem Postnasal-Drip litt).

³⁾ Bei starker Polypenbildung ist der Therapieverlauf nicht absehbar.

Für eine freie Nase ohne Medikamente


Das RC-Cornet® PLUS NASAL kann die oberen Atemwege sanft von Schleim befreien und ermöglicht die Regeneration der Schleimhaut. Voraussetzung ist eine regelmäßige Anwendung.³⁾

Ziele sind:


- Die bessere Belüftung und spürbare Befreiung der Nase – ganz ohne den Einsatz von Medikamenten.
- Die Gefahr absteigender Infekte sowie die bronchiale Überempfindlichkeit, z. B. bei Asthma zu senken.

Wie funktioniert das?

Bei der Ausatmung über das RC-Cornet® PLUS NASAL entsteht ein individuell einstellbarer, positiver Ausatemdruck mit Schwingungen, der die Schleimhäute in den oberen Atemwegen therapiert – vergleichbar mit einer Massage.

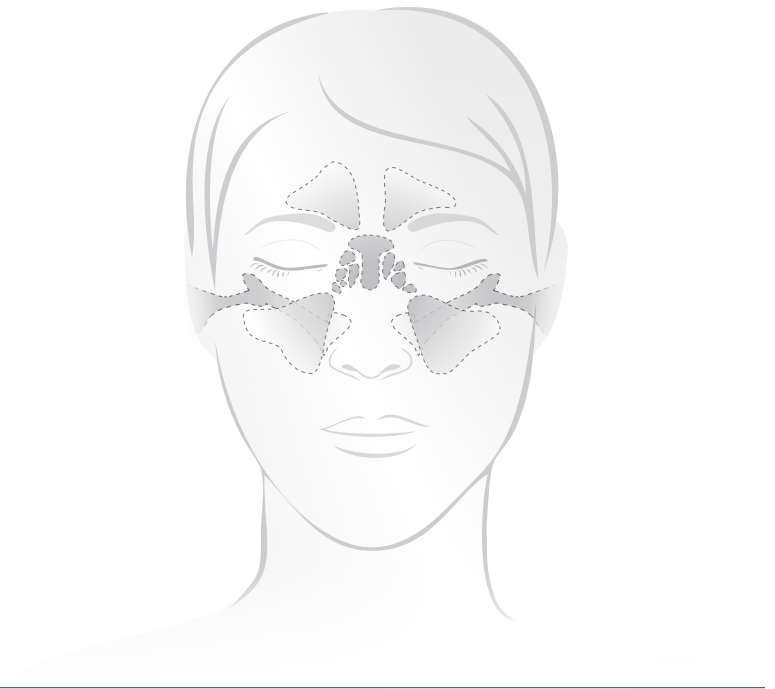

Besitzen Sie schon ein RC-Cornet® PLUS? Einfach umrüsten in ein RC-Cornet® PLUS NASAL:

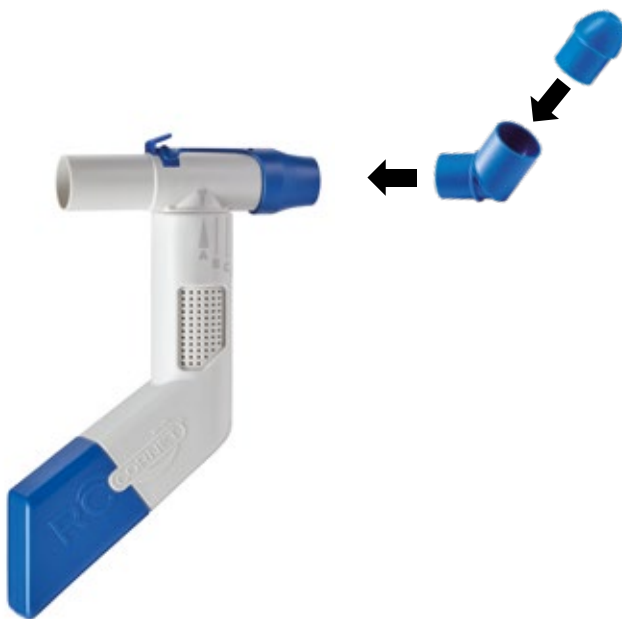

Atemtherapie obere Atemwege
Umrüstung RC-Cornet® PLUS mit
RC-Cornet® PLUS NASAL SET

INFO

RC-Cornet® PLUS NASAL SET
(Winkelstück und Nasenolive)
PZN 13 058 202
Artikel-Nr. 2683

RC-Cornet® PLUS TRACHEO – Sekretmanagement

Atemtherapie mit Oszillationen und Feuchtinhalations-Anschluss bei Tracheostomie

Das RC-Cornet® PLUS TRACHEO ist eine Variante des RC-Cornet® PLUS. Über einen integrierten Tracheoansatz (15 mm) ermöglicht das RC-Cornet® PLUS TRACHEO Patient:innen mit einer Kanüle (Tubus) die Atemtherapie zur Schleimlösung.

Mögliche Wirkungsweisen:

- löst Schleim, reduziert Atemnot und erleichtert das Abhusten
- Unterstützung beim Weaning


Produktmerkmale:

- das RC-Cornet® PLUS TRACHEO bietet die gleichen Produktmerkmale wie das RC-Cornet® PLUS
- speziell für tracheostomierte und sehr schwache Patient:innen geeignet
- integrierter, ISO-genormter Vernebleransatz ermöglicht die gleichzeitige Atemtherapie und Feuchtinhalation mit Verneblern zur besseren Sekretolyse (Kombi-Therapie)

Für nicht genormte Vernebler bieten wir das RC-Cornet® PLUS VERNEBLER SET an.

Tipp: Bei tracheostomierten Patient:innen kann es sinnvoll sein, mit Einstellung II zu beginnen.

Widerstand A: ab 7 cm/H₂O
Widerstand B: ab 9 cm/H₂O

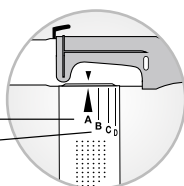


RC-Cornet® PLUS TRACHEO

PZN 12 441 324

Artikel-Nr. 2690

Erstattungsfähig durch den Haus-, Kinder- oder Lungenfacharzt unter Hilfsmittel-Positions-Nr. 14.24.08.0013

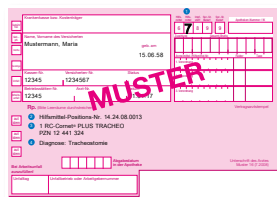

Notizen





ATEMTRAINING

RC-FIT® CLASSIC

Atemtherapie und Atemtraining mit Oszillationen und Tönen

Das RC-FIT® CLASSIC ist ein einzigartiger, sound-erzeugender, oszillierender, in- und expiratorischer Atemtrainer. Entspannungs- und Atemtherapiegerät in EINEM. Dadurch kann die Prävention, Rehabilitation sowie die gezielte Steigerung der Fitness unterstützt werden.

Mögliche Wirkungsweisen:

- kräftigt die Ein- und Ausatemmuskulatur
- hält die Atemwege offen
- löst Sekret mit Oszillationen
- reduziert Husten und Atemnot
- reduziert die Atemfrequenz
- beruhigt und entspannt

Produktmerkmale:

- 4 Intensitätsstufen
- klein, handlich im Hosentaschenformat
- lageunabhängig 
- entspricht höchsten klinischen Anforderungen (KRINKO) bezüglich Anwendung und Hygiene
- die RC-Masken ermöglichen tracheostomierten Patient:innen mit einem schwachen Mundschluss oder einem offenen Tracheostoma die Atemtherapie und das Atemtraining mit dem RC-FIT® CLASSIC



Ateminfo: langsame Ein- und Ausatmung über den Mund

RC-FIT® CLASSIC
PZN 17 875 642
Artikel-Nr. 2631

Hilfsmittel-Positions-Nr.
14.24.08.0018



RC-FIT® CLASSIC, die einzigartige, sounderzeugende Vibrationsplatte für Lunge und Zwerchfell:



Vibrationen können **beim Einatemtraining** die Atemmuskulatur stimulieren. Entsprechend kann das Training als nicht so anstrengend empfunden werden und Sekrete können schon bei der Einatmung gelöst werden.

Bei der Ausatmung können die Atemwege offen gehalten werden und Vibrationen an der Schleimhaut können zusätzlich Sekret lösen. Atemnot und Husten werden gelindert. Die tiefen, gleichmäßigen Töne beruhigen.

Zur Behandlung von Atembeschwerden, z. B. bei Long-/Post-COVID, COPD, Asthma bronchiale, Mukoviszidose (CF) sowie Rehabilitation nach Erkrankungen und Operationen oder auch Stress.

Zur präventiven Anwendung für mehr Leistungsfähigkeit im Alltag oder bei sportlichen Aktivitäten, Yoga & Mentaltraining (Mental Health).

Therapie & Training mit dem RC-FIT® CLASSIC

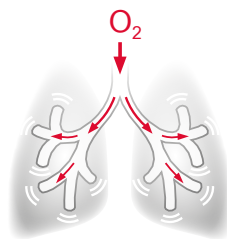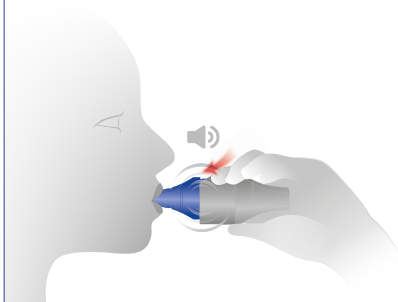



Tief in den Bauch einatmen

Bis 4 Sekunden.

Der Bauch wölbt sich vor und der Brustkorb hebt sich.



Halten nach der Einatmung 0–7 Sek. / *Hold after breathing in 0–7 sec.*

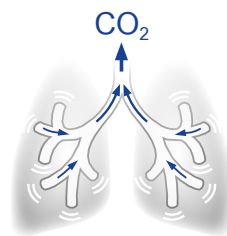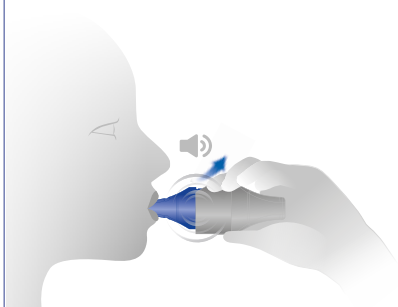

Ausatmen

Doppelt so lange wie die Einatmung. Der Bauch wölbt sich sanft nach innen.



Halten nach der Ausatmung 0–7 Sek. / *Hold after breathing out 0–7 sec.*

Fitter, entspannter und leistungsfähiger

Die Atmung kann ein Schlüssel zu mehr Leistungsfähigkeit, Gesundheit, Regeneration und Stressbewältigung sein.

Die möglichen Wirkungsweisen des RC-FIT® CLASSIC im Überblick:

- ⊕ **Kräftigung der Atemmuskulatur**
Zwerchfell und Hilfsmuskeln
- ⊕ **Weitung der Atemwege**
Verbesserung des Gasaustauschs
- ⊕ **Lösen von Sekret**
Reinigung und Befreiung der Atemwege
- ⊕ **Ruhe und Fokus**
Bei Stress, Atemnot und Konzentrationsmangel
- ⊕ **Verspannungen lösen**
Hilfe bei Spannungsschmerzen



Tief einatmen,
sanft ausatmen,
Gesundheit stärken

Notizen



PFLEGE UND HYGIENE

RC-Gel® NASAL

Wohltuende Pflege für die Nase

Versorgt bei trockener Nase die Nasenschleimhäute mit natürlicher Feuchtigkeit. Speziell für Sauerstoffpatient:innen geeignet.

Feuchtigkeit, wertvolle Inhaltsstoffe und eine regelmäßige Behandlung sind ausschlaggebend für das Wohlbefinden unserer Haut.

Produktmerkmale:

- rein natürliche Inhaltsstoffe
- tägliche Pflege der Nase zur Infektvorbeugung, begleitend zur Sauerstofftherapie und zur Behandlung chronischer Beschwerden geeignet
- isotonische Meersalzlösung für die Befeuchtung der Atemwege und Beruhigung gereizter Haut
- Hyaluronsäure für die Anregung der Zellenneubildung
- Menthol für die Erweiterung der Blutgefäße und ein angenehmes Erfrischungsgefühl in der Nasenhöhle
- Dexpanthenol zur Pflege gereizter Haut und Unterstützung des Heilungsprozesses

Anwendungsgebiete:

- Hautreizungen am Naseneingang
- trockene und gereizte Schleimhäute
- verstopfte Nase
- allergische Beschwerden (Heuschnupfen, Hausstaubmilbe, Pollenallergie)
- chronische Sinusitis



RC-Gel® NASAL
Inhalt 20 ml
PZN 12 510 686
Artikel-Nr. 260

Anwendung RC-Gel® NASAL ¹⁾



RC-Pflege® N Nasen- und Rachenspray

Reinigt und schützt Ihre Schleimhäute – effektiv und natürlich


RC-Pflege® N¹⁾ wirkt pflegend, auch bei der Zufuhr von Sauerstoff.

Produktmerkmale:


- zur Befeuchtung der Nasen- und Rachenschleimhaut
- zur Unterstützung der Regeneration der Nasenschleimhäute
- zur Reinigung der Nasennebenhöhlen von Staub, Pollen, Allergenen und trockenen Krusten
- begleitende Therapie bei Schnupfen, Heuschnupfen und ganzjährig allergischem Schnupfen
- täglich und dauerhaft anwendbar, ohne davon abhängig zu werden
- ohne Konservierungsstoffe und Treibgas



Anwendung RC-Pflege® N
als Nasenspray

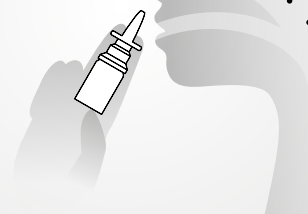

Anwendung RC-Pflege® N
als Rachenspray

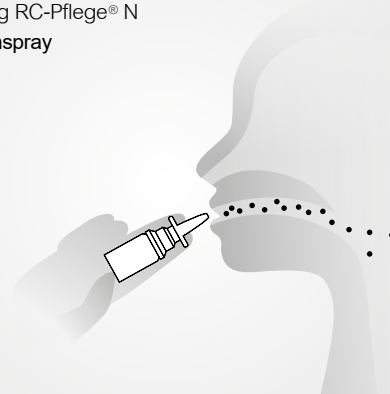

RC-Pflege® N
Inhalt 20 ml
PZN 06 415 162
Artikel-Nr. 250

INFO

¹⁾ Zusammensetzung: Isotonische Kochsalzlösung mit 2 % Dexpanthenol

RC-Clean® Reinigungsbeutel für die Mikrowelle

Reinigen wie die Profis – einfach, schnell und sicher

Der RC-Clean® Reinigungsbeutel für die hygienische Aufbereitung von Medizinprodukten und Babyartikeln in der Mikrowelle.

Produktmerkmale:

Für die Reinigung eignen sich alle Produkte, die auskochbar und mikrowelleneeignet sind, wie z. B.:

- die gesamten RC-Cornet® PLUS Varianten
- die gesamten RC-Cornet® Varianten
- die gesamten RC-Chamber® Varianten
- alle Masken zur Inhalation
- Schnuller und Babyflaschen

Mikrobiologische Untersuchungen bestätigen die Effektivität des RC-Clean® Reinigungsbeutels.¹⁾

Produktdetails:

Eine Packung enthält 5 RC-Clean® Reinigungsbeutel. Ein RC-Clean® Reinigungsbeutel kann bis zu 20 Mal wiederverwendet werden.



RC-Clean® Reinigungsbeutel
PZN 10 751 032
Artikel-Nr. 5000

INFO





INFORMATIONEN, WISSEN & SERVICE

Das Herzensprojekt von CEGLA ♥

Das Gesundheitsportal für Menschen
mit Atemwegserkrankungen



KOSTEN-
FREI

Leicht verständliche Informationen rund um
Atmung und Gesundheit bei COPD, Lungen-
emphysem sowie Asthma.

Jährlich nutzen rund 3 Millionen Menschen die Fach-
artikel, wöchentliche News und monatlichen Newsletter.
Ergänzt um die hochgeschätzten Blogger, ist eine
Gemeinschaft entstanden, die wichtigen Kontakt und
Austausch untereinander ermöglicht.

Zeit in der Beratung ist leider oft knapp und auch nach
dem Gespräch kommen weitere Fragen auf. Empfehlen
auch Sie Ihren Atemwegspatient:innen praxisbegleitend
das kostenfreie Gesundheitsportal.



Besuchen Sie uns unter:
www.leichter-atmen.de

www.leichter-atmen.de ist ein Service der

CEGLA
MEDIZINTECHNIK



ceglade

Die Unternehmens-Webseite bündelt jegliche Informationen. Details zu allen Produkten, Gebrauchsanweisungen, Kataloge und Prospekte, Wissen zu spezifischen Krankheitsbildern und vieles mehr. Möchten Sie regelmäßig Informationen direkt in Ihr E-Mail-Postfach erhalten, haben Sie unter diesem Link direkt die Möglichkeit, unseren [Fach-Newsletter zu abonnieren](#).



www.cegla.de/service/newsletter



YouTube

Auf der Video-Plattform finden Sie unser gesamtes Angebot an Informations- und Schulungsfilmen. Benötigen Sie diese oder Ausschnitte davon, sprechen Sie uns bitte an.



www.youtube.com/user/ceglatv



LinkedIn

Das Business-Netzwerk wächst und hat sich als Informationsmedium im beruflichen Umfeld etabliert. Entsprechend kommunizieren wir hier die relevanten Inhalte.



www.linkedin.com/company/ceglamedizintechnik/



Social Media

Jeder Kanal hat seine unterschiedlichen Nutzer. Um möglichst breit zu informieren, finden Sie uns auch hier:



www.facebook.com/ceglamedizintechnik



www.instagram.com/ceglamedizintechnik/




Notizen

Gesamtübersicht Produktkatalog

Bestellungen bitte an: bestellung@ceгла.de

Klinikprodukte finden Sie im Klinikcatalog

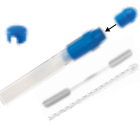Produktfoto	Produktname/Hilfsmittel-Positions-Nr.	Mögliche Wirkungsweisen/Funktion	PZN	Artikel-Nr.
Atemtherapie				
RC-Cornet® PLUS Familie		RC-Cornet® PLUS erstattungsfähig unter 14.24.08.0013	Löst Schleim, reduziert Husten und Atemnot	12 419 336 2600
		RC-Cornet® PLUS TRACHEO erstattungsfähig unter 14.24.08.0013	Manuelle Schleimlösung bei Tracheostomie	12 441 324 2690
		RC-Cornet® PLUS NASAL erstattungsfähig unter 14.24.08.0013	Freie Nase – ohne Medikamente	12 441 330 2680
		RC-Cornet® PLUS VERNEBLER SET*	Ermöglicht die Verbindung mit nicht genormten Verneblern bei der Kombi-Therapie	14 439 900 2651
		RC-Cornet® PLUS NASAL SET (Winkelstück und Nasenolive)	Zur Umrüstung auf RC-Cornet® PLUS NASAL, ermöglicht Anwendung der Kombi-Therapie	13 058 202 2683
		RC-Cornet® PLUS ERSATZSET	Ersatz bei Verschleiß oder Verlust	17 170 887 2641
		RC-Cornet® PLUS Mundstück	Ersatz für Umrüstung, Verschleiß oder Verlust	13 348 503 2620
		RC-Cornet® PLUS Tracheoansatz	Ersatz für Umrüstung, Verschleiß oder Verlust	13 348 532 2621
		RC-Cornet® PLUS Schlauch 2er-Set	Passend für alle Produktvarianten des RC-Cornet® PLUS, Silikon	13 058 194 2660
RC-Cornet® Familie		RC-Cornet® erstattungsfähig unter 14.24.08.0004	Löst Schleim, reduziert Husten und Atemnot	08 418 667 210
		RC-Cornet® N	Freie Nase – ohne Medikamente	08 862 327 220
		RC-Cornet® Mund-Nasen-Set	Ermöglicht den Umbau der RC-Cornet® / RC-Cornet® N Familie sowie Ersatz bei Verschleiß oder Verlust	17 170 893 2140
		RC-Cornet® / RC-Cornet® N Silikon-Ersatzventilschlauch 2er-Set, Silikon	Passend für RC-Cornet® und RC-Cornet® N	00 458 147 216

Produktfoto	Produktname/ Hilfsmittel-Positions-Nr.	Mögliche Wirkungsweisen/Funktion	PZN	Artikel-Nr.
Atemtraining und Atemtherapie				
	RC-FIT® CLASSIC erstattungsfähig unter 14.24.08.0018	Oszillierendes Atemtraining (OIMT) und oszillierende Atemtherapie (OPEP) sowie Entspannung in EINEM	17 875 642	2631
Hygiene				
	RC-Clean® Reinigungsbeutel für die Mikrowelle, 5 Stück pro Packung	Hygienische Aufbereitung von Medizinprodukten und Babyartikeln in der Mikrowelle	10 751 032	5000
Pflege				
	RC-Gel® NASAL	Wohltuende Pflege für die Nase speziell für Sauerstoffpatient:innen geeignet	12 510 686	260
	RC-Pflege® N	Nasen- & Rachenspray	06 415 162	250

Bestellungen bitte an: bestellung@cegla.de



Weitere Informationen
und Filme finden Sie unter
www.cegla.de

CEGLA Medizintechnik:

Ein echtes Familienunternehmen, in dem die Patient:innen und das leichtere Atmen im Mittelpunkt stehen.



Die beiden Generationen des Familienunternehmens CEGLA Medizintechnik

Die Apothekerin Ruth Cegla und ihr Mann, der Pneumologe Prof. Dr. med. Ulrich Cegla, haben atemtherapeutische Hilfsmittel neu erfunden, patentiert und weiterentwickelt. Innovationen, wie z. B. die oszillierenden Atemtherapiegeräte RC-Cornet®, RC-Cornet® PLUS und das RC-FIT® CLASSIC zeigen, dass Medizintechnik aus Deutschland national und international begeistert.

Erfolgreich in zweiter Generation von Tochter Andrea und ihrem Ehemann Jens Ebinger geführt, steht CEGLA konsequent für Qualität, Sicherheit und Service. Doppelt ausgezeichnet mit dem Deutschen Gesundheitsaward als Gesamtsieger für Atem- und Schlaftherapieprodukte 2023 und 2024.



CEGLA Medizintechnik ist Mitglied bei den nebenstehenden Organisationen und unterstützt zudem viele Patientenorganisationen im Bereich chronischer Atemwegserkrankungen.



Mehr dazu unter: www.cegla.de/unternehmen/ueber-uns



LEICHTER ATMEN
GESUNDHEITSPORTAL

leichter-atmen.de bietet Menschen mit Atemwegserkrankungen, Angehörigen und Interessierten umfangreiche Informationen zu Lungengesundheit sowie Unterstützung zur Verbesserung der Lebensqualität.

CEGLA Medizintechnik GmbH
Horresser Berg 1
DE-56410 Montabaur
Tel +49 2602 92 13-0
info@cegla.de
cegla.de

Copyright 2025 by CEGLA Medizintechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten, Nachdruck und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Eigentümerin der Trade Marks und der registrierten Trade Marks ist das Unternehmen CEGLA Medizintechnik GmbH.

Bitte Gebrauchsanweisung und Gegenindikationen beachten. Produktabbildungen können in Form und Farbe vom Original abweichen.

CEGLA
MEDIZINTECHNIK