

KURZANLEITUNG



RC-Cornet[®] PLUS



RC-Cornet[®] PLUS TRACHEO

Die Atemtherapie stellt einen wichtigen Baustein bei der Behandlung von chronischen Erkrankungen der Atemwege dar. Die Befreiung von Schleim ist bei Asthma, COPD, Mukoviszidose die zentrale Herausforderung.

ANWENDUNG



3 x tägliche Anwendung für mindestens 2 Minuten pro Einstellung oder wie vom Arzt empfohlen.





Alle Produkte der RC-Cornet[®] PLUS Varianten können lageunabhängig im Sitzen, Stehen oder Liegen angewendet werden.

EINSTELLUNGSMÖGLICHKEITEN



Zwei Einstellungen: Mit Einstellung I werden die Atemwege zunächst geweitet für eine anschließende, effektivere Schleimlösung mit Einstellung II.

Einstellung I: Stabilisierender Ausatemdruck zur Weitung der Atemwege

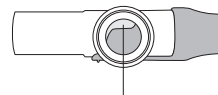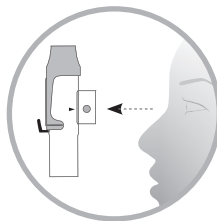


Die komplette Ausatemluft wird langsam und sanft durch die kleinere Öffnung (Stenose) in den Schlauch durchgeleitet und kann zu einer schrittweisen Weitung der Atemwege führen.

Einstellung II: Mobilisierender Ausatemdruck mit hoher Flussrate zum Sekretabtransport*

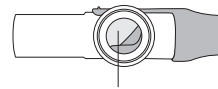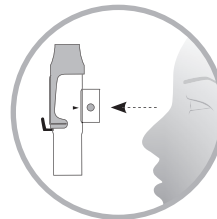


Durch die Drehung wird die Öffnung vergrößert, sodass die komplette Ausatemluft schnell und kräftig in den Schlauch gelangt. Das Sekret in den Atemwegen wird dadurch verflüssigt und kann leicht abgehustet werden.

RC-Cornet[®] PLUS WIDERSTÄNDE:

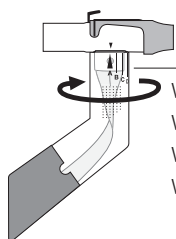

Widerstand A: 4 cm/H₂O
Widerstand B: 7 cm/H₂O
Widerstand C: 10 cm/H₂O
Widerstand D: 16 cm/H₂O

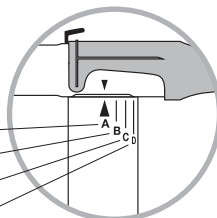

Verschiedene Widerstände pro Einstellung, sowie die Nutzung der kompletten Ausatemluft ermöglicht gerade sehr schwachen Patienten die RC-Cornet[®] PLUS Therapie. Durch das Einstellen der Widerstände A–D wird der Schlauch in sich gedreht.


Je Einstellung erhöht sich so stufenweise der Widerstand, gegen den ausgeatmet wird. Diese Individualisierbarkeit verhilft vielen unterschiedlichen Patientengruppen, eine effiziente Atemtherapie durchzuführen.




Das Wirkprinzip und die Gebrauchsanweisung sind als Video unter www.cegla.de verfügbar.

* Studien auf Anfrage erhältlich

ANLEITUNG REINIGUNG

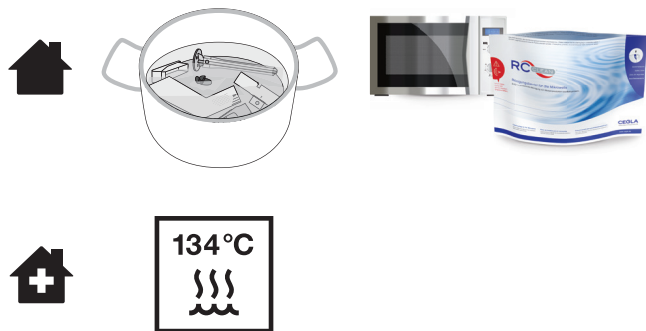

ANLEITUNG ZUSAMMENSTECKEN

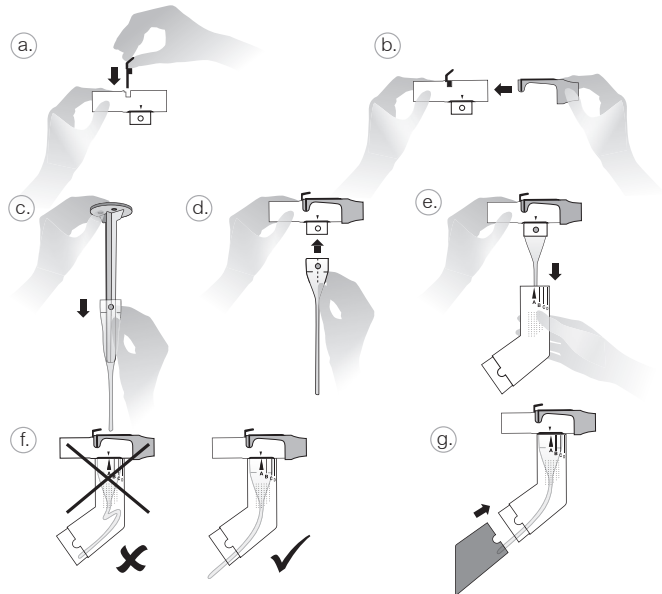

Waschen Sie sich bitte vor der Reinigung die Hände. Zur Reinigung zerlegen Sie das RC-Cornet® PLUS in seine Einzelteile. Reinigen Sie alle Einzelteile gründlich mit handelsüblichen Geschirrspülmittel und lauwarmen Wasser. Spülen Sie mit klarem Wasser nach. Sie können alle Teile nach der Reinigung im Vaporisator oder ca. 5 Minuten in kochendem Wasser reinigen. Maximale Temperatur 134 °C. Lassen Sie danach alle Teile an der Luft vollständig trocknen! In der Klinik kann das RC-Cornet® PLUS auch maschinell gereinigt oder autoklaviert werden.

Eine separate klinische Aufbereitungsanleitung erhalten Sie auf Anfrage unter hygiene@cegla.de

RC-Clean

Einfache und schnelle Reinigung von Medizinprodukten sowie Babyartikeln. Nur für mikrowelleneignete Produkte. Artikel-Nr. 5000 | PZN 10 751 032



Waschen Sie sich bitte vor dem Zusammenstecken die Hände.

- Setzen Sie das Einatemventil in den Adapter ein.
- Stecken Sie das Mundstück mittig auf den Adapter. Für die Anwendung folgen Sie bitte immer der Beschreibung.
- Ziehen Sie die Reinigungshilfe aus dem Ventilschlauch.
- Schieben Sie den Schlauch in den Adapter und achten Sie darauf, dass der Zentrierpunkt in die Aussparung am Adapter einrastet.
- Führen Sie dann den entstandenen Aufsatz in das Gehäuse ein. Achten Sie bitte darauf, dass die Pfeile auf dem Adapter und dem Gehäuse exakt übereinander stehen.
- Kontrollieren Sie die Lage des Schlauches. Er darf nicht gestaucht im Gehäuse liegen.
- Setzen Sie den Gehäusedeckel auf.

Die Kombi-Therapie – Verbindung von Atemtherapie und Feuchtinhalation ermöglicht:




RC-Cornet® PLUS
Kombi-Therapie
(alle Varianten)



Verkürzung
der täglichen
Therapiezeit



Verbesserung der
Medikamenten-
deposition

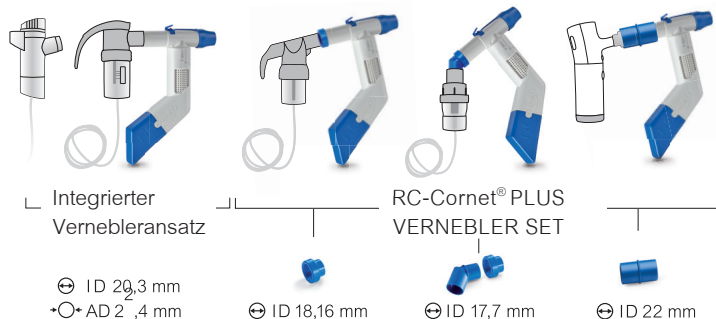

Weitung der Atemwege in Einstellung I und gleichzeitige Feuchteinhalation über den integrierten Vernebleransatz*. Der integrierte Vernebleransatz ist passend für alle ISO-genormten Vernebler.

Für nicht-ISO-genormte Vernebler:
RC-Cornet® PLUS VERNEBLER SET
Artikel-Nr. 2651



Die Kombination der einminütigen Weitung der Atemwege in Einstellung I und anschließende Anwendung des RC-Chamber® mit Dosieraerosol kann die Medikamentendeposition verbessern.

RC-Chamber® mit Mundstück
Inhalierhilfe inkl. Sicherheitsbeutel,
Notfallplan und Schutzengel-Anhänger
Artikel-Nr. 30300 | PZN 11 711 023



* Dosieraerosol wird separat verordnet.