


Sekretmanagement mit dem RC-Cornet® PLUS

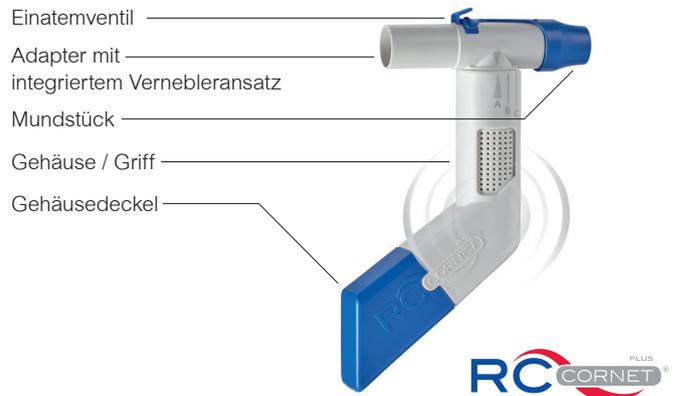

ANWENDUNG:

Alle Produkte der RC-Cornet® PLUS Varianten können lageunabhängig im Sitzen, Stehen oder Liegen angewendet werden.

EMPFOLHENE ANWENDUNGSDAUER:

3 x tägliche Anwendung für mind. 2 Minuten pro Einstellung oder wie vom Arzt empfohlen.

RC-Cornet® PLUS WIDERSTÄNDE:

Vier Widerstände: Die 4 verschiedenen Widerstände ermöglichen eine individuelle Atemtherapie auch schon für sehr schwache Patienten (inklusive neuromuskuläre und Schlaganfall-Patienten) durch die Nutzung der kompletten Ausatemluft.

TIPP: Für einen leichteren Einstieg in die Atemtherapie mit dem RC-Cornet® PLUS starten Sie mit der Einstellung II.

Einstellungsmöglichkeiten:

Mit Einstellung I werden die Atemwege zunächst geweitet für eine anschließende, effektivere Schleimlösung mit Einstellung II.


Einstellung I:

Stabilisierender Ausatemdruck zur Weitung der Atemwege



Einstellung II:

Mobilisierender Ausatemdruck mit hoher Flussrate zum Sekretabtransport*

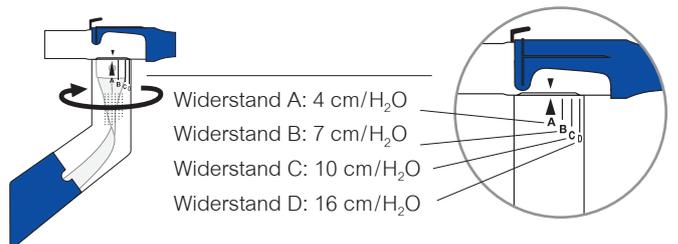

Kombi-Therapie – die gleichzeitige Atemtherapie und Feuchtinhalation ermöglicht:




RC-Cornet® PLUS
Kombi-Therapie



Verkürzung
der täglichen
Therapiezeit



Verbesserung der
Medikamenten-
deposition

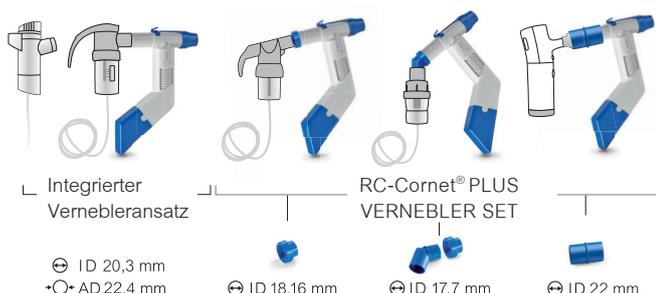

Weitung der Atemwege in Einstellung I und gleichzeitige Feuchtinhalation über den integrierten Vernebleransatz*. Der integrierte Vernebleransatz ist passend für alle ISO-genormten Vernebler.



Für nicht-ISO-genormte Vernebler:
RC-Cornet® PLUS VERNEBLER SET
Artikel-Nr. 2651




ANLEITUNG REINIGUNG UND DESINFEKTION (AUSKOCHEN)

Waschen Sie sich bitte vor der Reinigung die Hände. Zur Reinigung zerlegen Sie das RC-Cornet® PLUS in seine Einzelteile. Reinigen Sie alle Einzelteile gründlich mit handelsüblichen Geschirrspülmittel und lauwarmen Wasser. Spülen Sie mit klarem Wasser nach.

Desinfizieren Sie alle Teile nach der Reinigung im Vaporisator oder ca. 5 Minuten in kochendem Wasser. Maximale Temperatur 134 °C. Lassen Sie danach alle Teile an der Luft vollständig trocknen!

In der Klinik kann das RC-Cornet® PLUS auch maschinell gereinigt oder autoklaviert werden.


Eine separate klinische Aufbereitungsanleitung erhalten Sie auf Anfrage unter info@ceгла.de

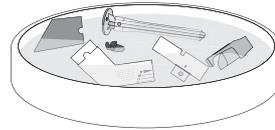

ANLEITUNG ZUSAMMENSTECKEN

Waschen Sie sich bitte vor dem Zusammenstecken die Hände.

- Setzen Sie das Einatemventil in den Adapter ein.
- Stecken Sie das Mundstück mittig auf den Adapter. Für die Anwendung folgen Sie bitte immer der Beschreibung.
- Ziehen Sie die Reinigungshilfe aus dem Ventilschlauch.
- Schieben Sie den Schlauch in den Adapter und achten Sie darauf, dass der Zentrierpunkt in die Aussparung am Adapter einrastet.
- Führen Sie dann den entstandenen Aufsatz in das Gehäuse ein. Achten Sie bitte darauf, dass die Pfeile auf dem Adapter und dem Gehäuse exakt übereinander stehen.
- Kontrollieren Sie die Lage des Schlauches. Er darf nicht gestaucht im Gehäuse liegen.
- Setzen Sie den Gehäusedeckel auf.

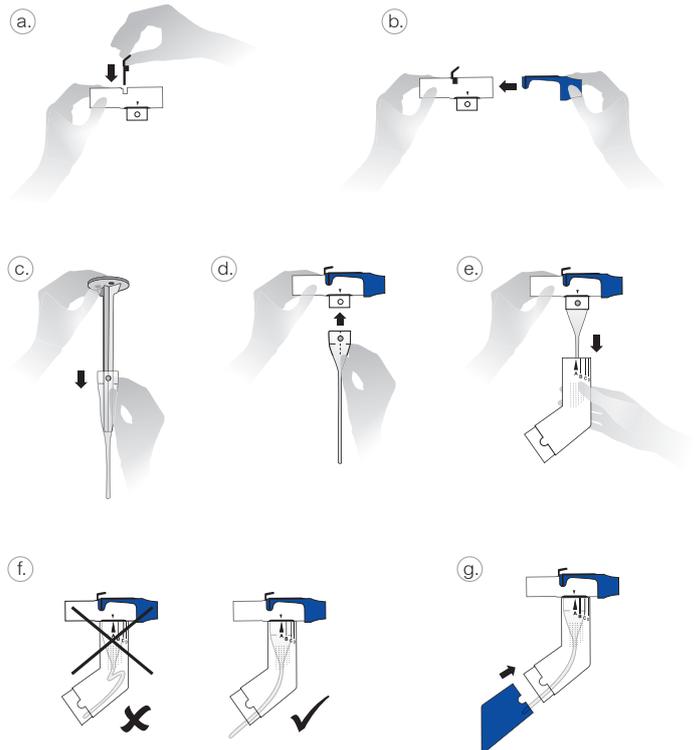

Weitere Informationen und Film:
www.ceгла.de/produkte/atemtherapie/rc-cornet-plus/
oder einfach den QR Code scannen.



Bitte Gebrauchsanweisung und Kontraindikationen beachten.