



Artikel Nr. 2600 / PZN 12 419 336
Hilfsmittel-Positions-Nr.
14.24.08.0013



RC-Cornet^{PLUS}







RC-Cornet^{PLUS} TRACHEO


Sekretmanagement der unteren Atemwege¹

- Löst Schleim, reduziert Husten und Atemnot
- Verbessert die Medikamentendeposition in Kombination mit Verneblern
- Lageunabhängig
- Speziell für tracheotomierte und sehr schwache Patienten (Tracheo)
- Unterstützung beim Weaning (Tracheo)

Der 2 in 1-Atemtrainer mit (I) oszillierendem positiven Ausatemdruck und (II) hohem Fluss²

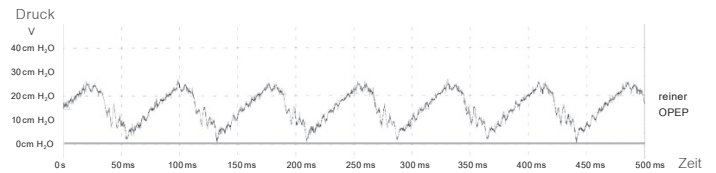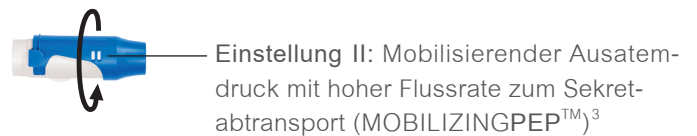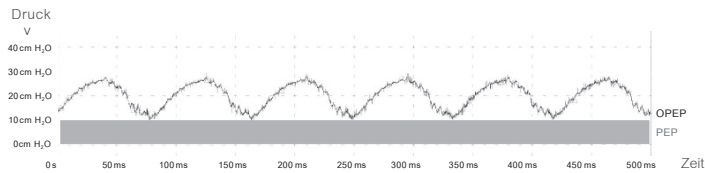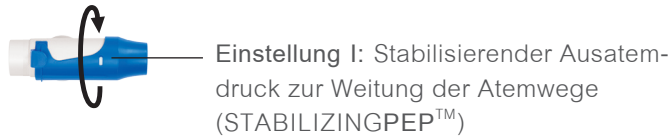


RC-Cornet^{PLUS} Widerstände:

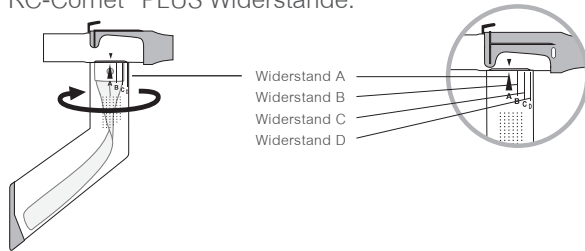

Das RC-Cornet^{PLUS} ermöglicht gerade sehr schwachen (inklusive neuromuskuläre und Schlaganfall-) Patienten die Atemtherapie, durch die verschiedenen Widerstände pro Einstellung, sowie die Nutzung der kompletten Ausatemluft. Tipp: Bei tracheotomierten Patienten kann es sinnvoll sein mit Einstellung II zu beginnen.

Atem- und Inhalationstherapie effektiv kombinieren⁴

Ein Auszug an Kombinationsmöglichkeiten:

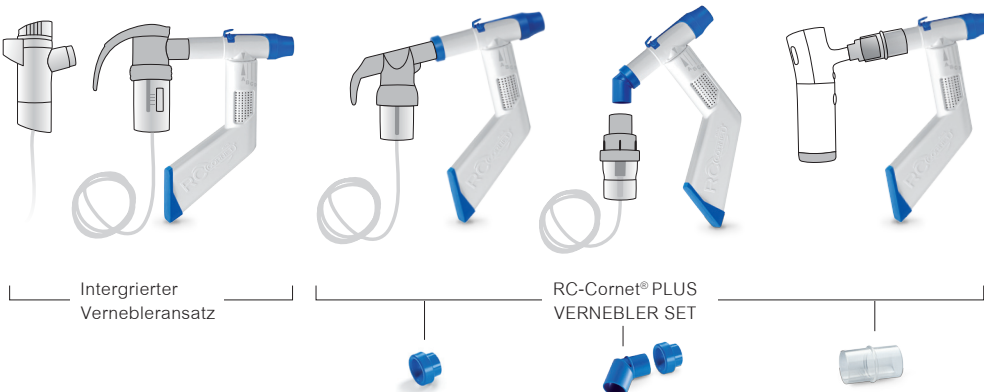

RC-Cornet^{PLUS} Zubehör:

- RC-Cornet^{PLUS} Zusatzmundstück oval für Schlaganfall- oder neuromuskuläre Patienten geeignet, Artikel-Nr. 2622 | PZN 13 753 391
- RC-Cornet^{PLUS} Druck-Mess-Adapter Artikel-Nr. 2350 | PZN 03 030 467
- RC-Cornet^{PLUS} VERNEBLER SET⁵ Artikel-Nr. 2651 | PZN 14 439 900

¹ AARC Guidelines und Leitlinie der Deutschen Atemwegsliga und der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie zur Diagnostik und Therapie von Patienten mit chronisch obstruktiver Bronchitis und Lungenerkrankung (COPD), ² RC-Cornet^{PLUS} Messungen mit 15cm H₂O CPAP, ³ Freitag L, Long WM, Kim CS, Wanner A: Removal of excessive bronchial secretions by asymmetric high-frequency oscillations: <https://www.physiology.org/doi/abs/10.1152/jappl.1989.67.2.614>, ⁴ U.H. Cegla, J.-H. Jost, A. Harten, T. Weber / RC-Cornet^{PLUS} improves the bronchodilating effect of Ipratropium-bromide (Atrovent)[®] inhalation in COPD patients / Pneumologie 2001, Jahrgang 55, Seite 465-469, ⁵ Änderungen in den Depositionsdaten sind je nach Anwendung möglich.